

DENTURE & RETAINER CLEANSER FOAM

GERMANY TECHNOLOGY

โฟมทำความสะอาด

ฟันปลอม & รีเทนเนอร์

(เครื่องมือแพทย์)







DENTURE & RETAINER CLEANSER FOAM



Germany innovations for dental care
(เครื่องมือแพทย์)

NONIONIC SURFACTANT : สารโพนวตักรรรมเยอรมัน Grade ECOCERT COSMOS Approved, Naturalness 98% สำหรับช่องปากเป็นสารโพนที่ ทำความสะอาดชนิดไม่มีประจุจากธรรมชาติ ทำความสะอาด ได้ดี มีความอ่อนโยนสูง NON SLS ฟองหนาฟูม

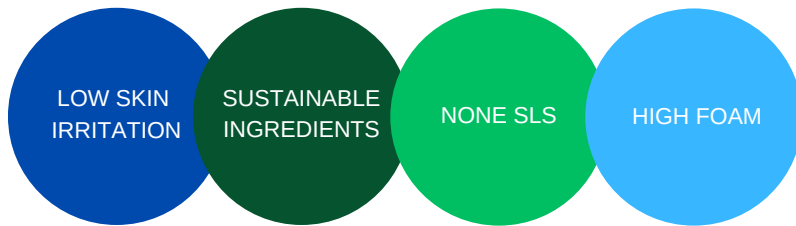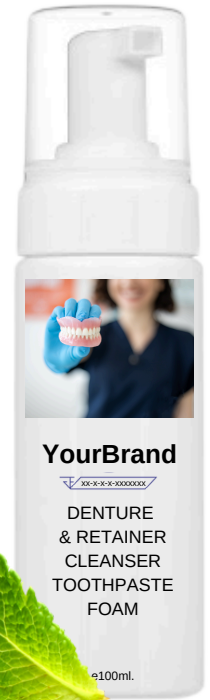

Poloxamer 407 สารทำลายคราบชนิดพิเศษสำหรับงานในช่องปากโดยเฉพาะ (Germany) การชอกซอนแทรกผ่านของเนื้อโพนสูงทำให้สิ่งสกปรกถูกชำระล้างออกโดยง่าย




Taste Improvement
(Sensory evaluation by electronic tongue by Shanghai Institute of Technology*)

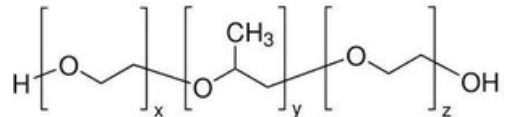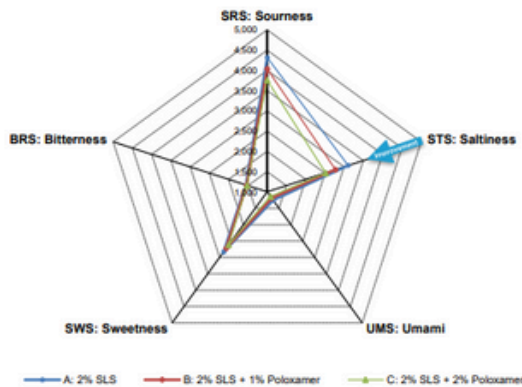

Poloxamer 407 reduces the sourness and saltiness induced by SLS solution

Ethylhexylglycerin : Broad Spectrum Anti-biotic ลดการสะสมของแบคทีเรีย-เชื้อรา มีความอ่อนโยนสูง และปลอดภัยต่อมนุษย์

| International approvals | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| | Caprylyl Glycol | Ethylhexylglycerin |
| Europe/USA: | INCI name: Caprylyl Glycol | INCI name: Ethylhexylglycerin |
| Australia: | listed on AICS TGA approved | listed on AICS/NICNAS (NA/966) TGA approved |
| Canada: | listed on DSL | listed on DSL |
| Japan: | listed on ENCS | listed on ENCS listed on JSQI listed on Japanese INCI list |

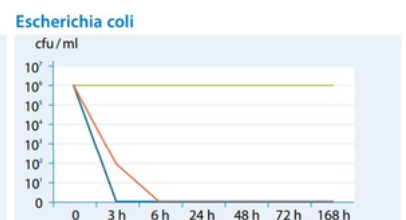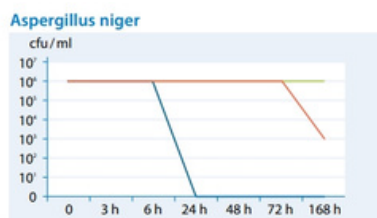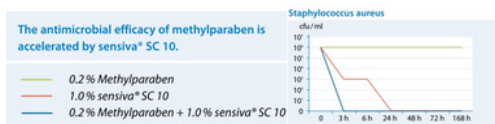

**ข้อดีของการใช้โฟมทำความสะอาด
ฟันปลอม-รีเทนเนอร์ & ยาสีฟัน :**
(เครื่องมือแพทย์)



1. Broad Spectrum Anti-biotic ลดการสะสมเชื้อแบคทีเรีย-เชื้อรา มีความอ่อนโยนสูงและปลอดภัยต่อมนุษย์ (USA)

2. เทคโนโลยีจากเยอรมัน

3. ทำความสะอาด ฟันปลอม , Invisalign , รีเทนเนอร์ รีเทนเนอร์ใส

4. สารฟองอ่อนโยนสูง Grade ECOCERT COSMOS Approved, Naturalness 98% ระคายเคืองต่ำปลอดภัยต่อฟันปลอม-รีเทนเนอร์ ช่องปาก-ฟัน-เหงือก ระดับการทำความสะอาดดี เนื้อโฟมแน่น (Germany)

5. สารทำลายคราบชนิดพิเศษสำหรับงานในช่องปาก โดยเฉพาะ (Germany) การชอกซอนแทรกผ่านของเนื้อโฟมสูงทำให้สิ่งสกปรกถูกชำระล้างออกโดยง่าย

6. กลิ่น Peppermint สดชื่น


**ประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อรา (ไม่พบเชื้อรา)
รายงานผลทดสอบโดย NCTC**

| Test Item | Result | Units |
|-------------------------------------|--------|---------|
| Total combined yeast and mold count | 0.00 | CFUs/mL |

**ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (ลดลง 100%)
รายงานผลทดสอบโดย NCTC**

| Test organisms | Concentration of inoculum (CFUs/mL) | Number of colonies after exposure time (CFUs/mL) | % Reduction |
|------------------|-------------------------------------|--|-------------|
| <i>S. mutans</i> | 5.67x10 ³ | 0.00 | 100 |

DENTURE & RETAINER CLEANSER FOAM (เครื่องมือแพทย์)

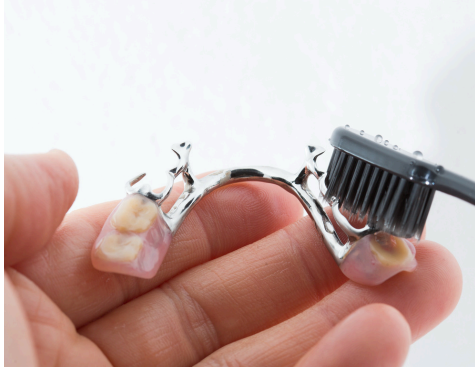

โฟมทำความสะอาดฟันปลอม-รีเทนเนอร์ :

ที่ได้รับการแนะนำจากทันตแพทย์ สำหรับทำความสะอาดฟัน-เหงือก รวมถึง Invisalign รีเทนเนอร์ รีเทนเนอร์ใส และฟันปลอม โฟมทำความสะอาดฟันปลอม-รีเทนเนอร์ ไม่ทำลาย-ไม่ก่อให้เกิดการสีกร่อนของฟันผิวฟันปลอม-รีเทนเนอร์ หมดคราบไขมันและสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำได้อย่างหมดจด หมดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นปาก ทำความสะอาดด้วยกลืนมินต์สดชื่นใช้ง่าย เนื้อโฟมละเอียด ช่วยลดกลิ่นปาก

รายละเอียดสินค้า-วัตถุประสงค์ :


โฟมทำความสะอาดฟันปลอม-รีเทนเนอร์ สามารถชำระล้างคราบมัน กำจัดกลิ่นจากอาหารที่รับประทาน เนื้อโฟมมีความปลอดภัยต่อช่องปาก และมีความละเอียดอ่อนโยน ไม่ทำลาย-ไม่ก่อให้เกิดการสีกร่อนของฟันผิวฟันปลอม-รีเทนเนอร์

วิธีใช้ :

- กดบีบเนื้อโฟม 1-2 ครั้ง ลงบนฟันปลอม-รีเทนเนอร์ และใช้แปรงสีฟันขนนุ่มทำความสะอาดเบาๆ ทั่ว
- ใช้ไม้พันสำลีเช็ดบริเวณร่องที่เข้าถึงยากต่อการทำความสะอาด
- ล้างน้ำออกให้สะอาดแนะนำให้ใช้ทุกครั้งหลังมื้ออาหารเพื่อความสะอาด สดชื่น

คำเตือน : หากฟันปลอมที่ล้างด้วยโฟมทำความสะอาดฟันปลอม นำไปใส่เข้าปากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ปรึกษาทันตแพทย์

การเก็บรักษา : เก็บโฟมทำความสะอาดให้พ้นแสงแดด และที่เปียกชื้น

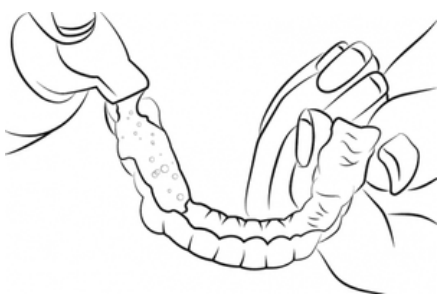

1.



2.



3.



ISO 22716:2007
CERTIFICATION



GMP
CERTIFICATION



HOTLINE :

064-983-8991

LINE ID :
i-cosmetic



FACEBOOK



i-COSMETIC co.,Ltd.

OEM Cosmetic Manufacturer

Skincare-Dental product-Medical Device

ISO22716 - GMP

<https://www.i-cosmetic.tech/>