

Amino acid mix




## DENTURE & RETAINER CLEANSER FOAM

GERMANY TECHNOLOGY

### โฟมทำความสะอาด

### ฟันปลอม & รีเทนเนอร์

(เครื่องมือแพทย์)

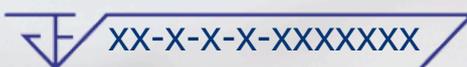


# สารโฟมทำความสะอาดฟันปลอม-รีเทนเนอร์ นวัตกรรมจากญี่ปุ่น : สารโพลิเมอร์อะมิโนแอตทำความสะอาดให้ความอ่อนโยนสูง




Amino acid mix

## Molecular Structure

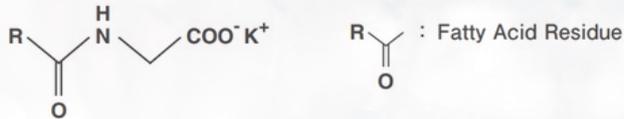

ความเป็นพิษต่ำ , มีความอ่อนโยนสูง

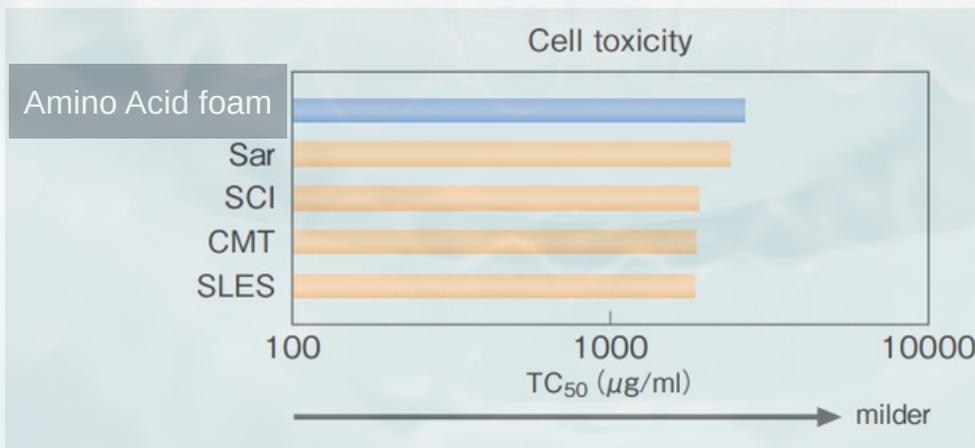

ทำความสะอาดได้ในสภาวะ pH ที่เป็นกลางหรือด่าง

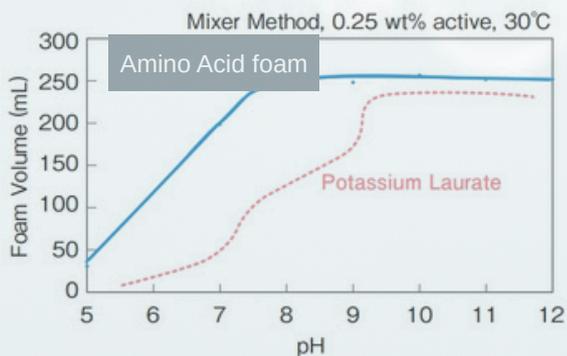


Figure 1 Foam Volume 1 min.

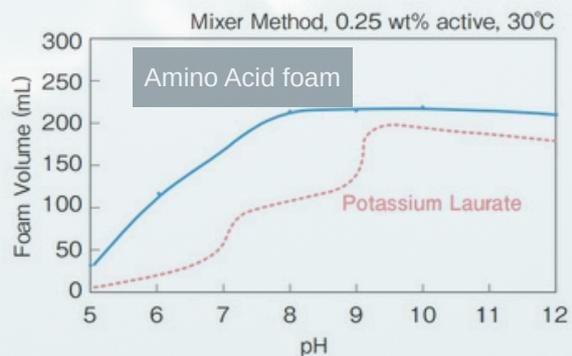


Figure 2 Foam Volume 5 min.

## กลิ่น SPEARMINT Essential oil

จากฝรั่งเศส (FRANCE) BONTOUXS.A.S.

กลิ่นที่หอม สดชื่น และให้ความรู้สึกสะอาด ทำให้รู้สึกผ่อนคลายเวลาใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อช่องปาก



**สารฆ่าเชื้อสกัดจากพืชตระกูลมินต์ (japan)  
เพื่อฟันปลอม-รีเทนเนอร์  
ระดับการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย-เชื้อราสูง  
โดยปราศจาก แอลกอฮอล์**

**Antibacterial activities**

bacteria, fungi, and yeasts.

<Bacteria>

(Gram-positive bacteria)

*Mycobacterium H2*

*Bacillus subtilis ATCC 6633*

*Bacillus fluorescens*

*Bacillus cereus*

*Staphylococcus aureus FDA 209P*

(Gram-negative bacteria)

*Escherichia coli IFO 3301*

*Klebsiella pneumoniae IFO 13277*

*Vibrio parahaemolyticus IFO 12711*

*Salmonella typhimurium IFO 13245*

*Pseudomonas aeruginosa IFO 3755*

<Fungi/yeasts>

*Pullularia pullulans IFO 6353*

*Cladosporium cladosporioides IFO 6348*

*Chaetomium globosum ATCC 6205*

*Penicillium citrinum ATCC 9849*

*Aspergillus niger ATCC 6275*

*Aspergillus oryzae*

*Rhizopus stolonifer S.N.32*

*Gliocladium virens IFO 6355*

*Trichophyton ferrugineum*

*Trichophyton rubrum*

*Trichophyton interdigitale*

*Trichophyton meniagrophytes*

*Zygosaccharomyces salsus*

*Williano anomala*

*Candida sp.*

*Saccharomyces sp.*

MIC (ppm)

50

150

100

150

150

200

200

250

200

500

75

80

75

100

75

50

75

100

100

100

100

100

50

50

100

100



(Data obtained by the laboratory of a pharmaceutical company and our company)

## คุณสมบัติของการใช้โฟมทำความสะอาด ฟันปลอม-รีเทนเนอร์

(เครื่องมือแพทย์)

1. Broad-spectrum antibiotic มีฤทธิ์การฆ่าเชื้อครอบคลุมแบคทีเรีย เชื้อรา-เชื้อไวรัส ปราศจาก แอลกอฮอล์

2. สารนวัตกรรมเทคโนโลยีญี่ปุ่นเพื่อความปลอดภัยต่อมนุษย์

3. ทำความสะอาด ฟันปลอม , Invisalign , รีเทนเนอร์ , รีเทนเนอร์ใส

4. สารโฟมอะมิโนแอตซิด อ่อนโยนสูง ระคายเคืองต่ำปลอดภัย ต่อฟันปลอม-รีเทนเนอร์ ช่องปาก-ฟัน-เหงือก ระดับการทำ ความสะอาดดี เนื้อโฟมแน่น

5. กลิ่น Spearmint สดชื่น



# DENTURE & RETAINER CLEANSER FOAM (เครื่องมือแพทย์)



## โฟมทำความสะอาดฟันปลอม-รีเทนเนอร์ :

ได้รับการแนะนำจากทันตแพทย์ สำหรับทำความสะอาดฟันปลอม รีเทนเนอร์ อุปกรณ์จัดฟันใส และอุปกรณ์ป้องกันกร่อนกัดฟัน โฟมทำความสะอาดฟันปลอม-รีเทนเนอร์ ไม่ทำลาย-ไม่ก่อให้เกิดการสีกร่อนของฟันผิวฟันปลอม-รีเทนเนอร์ งดคราบมันและสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำได้อย่างหมดจด งดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นปาก พร้อมด้วยกลิ่นมินต์สดชื่นใช้ง่าย เนื้อโฟมละเอียด ช่วยลดกลิ่นปากที่เกิดจากการใส่อุปกรณ์ในช่องปาก

## รายละเอียดสินค้า-วัตถุประสงค์ :


โฟมทำความสะอาดฟันปลอม-รีเทนเนอร์ สามารถชำระล้างคราบมัน กำจัดกลิ่นจากอาหารที่รับประทาน เนื้อโฟมมีความปลอดภัยต่อช่องปาก และมีความละเอียดอ่อนโยน ไม่ทำลาย-ไม่ก่อให้เกิดการสีกร่อนของฟันผิวฟันปลอม-รีเทนเนอร์

## วิธีใช้ :

- กดบีบเนื้อโฟม 2-3 ครั้ง ลงบนฟันปลอม-รีเทนเนอร์ และใช้แปรงสีฟันขนนุ่มทำความสะอาดเบาๆ ให้ทั่ว
- ใช้ไม้พันสำลีเช็ดบริเวณร่องที่เข้าถึงยากต่อการทำความสะอาด
- ล้างน้ำออกให้สะอาดแนะนำให้ใช้ทุกครั้งหลังมื้ออาหารเพื่อความสะอาด สดชื่น

**คำเตือน :** หากฟันปลอมที่ล้างด้วยโฟมทำความสะอาดฟันปลอม นำไปใส่เข้าปากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ปรึกษาทันตแพทย์

**การเก็บรักษา :** เก็บโฟมทำความสะอาดให้พ้นแสงแดด และที่เปียกชื้น

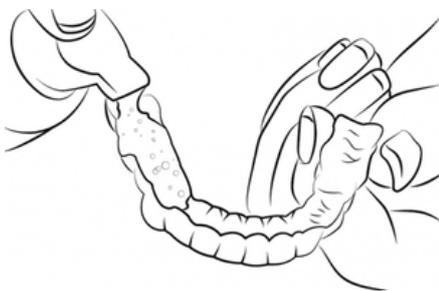

1.



2.



3.



ISO 22716:2007  
CERTIFICATION



GMP  
CERTIFICATION



**HOTLINE :**

**064-983-8991**

**LINE ID :**  
**i-cosmetic**



**FACEBOOK**



**i-COSMETIC co.,Ltd.**

**OEM Cosmetic Manufacturer**

Skincare-Dental product-Medical Device

ISO22716 - GMP

<https://www.i-cosmetic.tech/>