




โฟมทำความสะอาด
ฟันปลอม-รีเทนเนอร์-invisalign
(เครื่องมือแพทย์)




สารโฟมทำความสะอาดฟีนปปลอม-รีเทนเนอร์ นวัตกรรมจากญี่ปุ่น : สารโฟมอะมิโนแอตซิดทำความสะอาดให้ความอ่อนโยนสูง



Molecular Structure

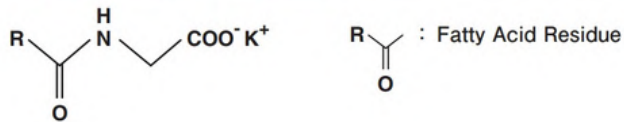

ความเป็นพิษต่ำ , มีความอ่อนโยนสูง

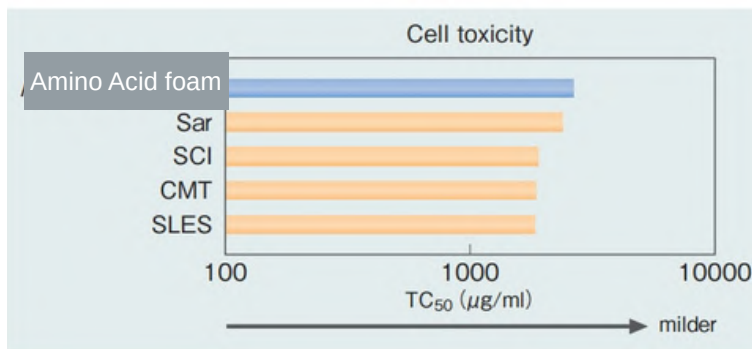

ทำความสะอาดได้ในสภาวะ pH ที่เป็นกลางหรือด่าง

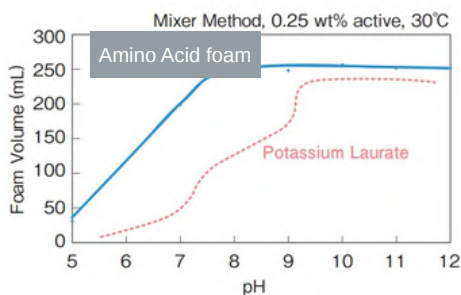


Figure 1 Foam Volume 1 min.


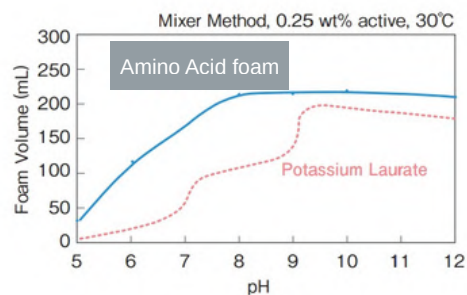


Figure 2 Foam Volume 5 min.

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

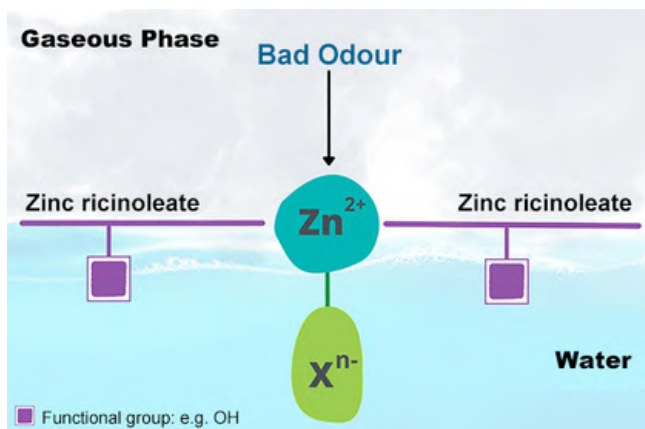

**สารฆ่าเชื้อสกัดจากพืชตระกูลมินต์ (japan)
เพื่อฟ้นปลอม-รีเทนเนอร์
ระดับการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย-เชื้อราสูง
โดยปราศจาก แอลกอฮอล์**

Antibacterial activites

bacteria, fungi, and yeasts.

<Bacteria>

(Gram-positive bacteria)	MIC (ppm)
<i>Mycobacterium H2</i>	50
<i>Bacillus subtilis ATCC 6633</i>	150
<i>Bacillus fluorescens</i>	100
<i>Bacillus cereus</i>	150
<i>Staphylococcus aureus FDA 209P</i>	150
(Gram-negative bacteria)	
<i>Escherichia coli IFO 3301</i>	200
<i>Klebsiella pneumoniae IFO 13277</i>	200
<i>Vibrio parahaemolyticus IFO 12711</i>	250
<i>Salmonella typhimurium IFO 13245</i>	200
<i>Pseudomonas aeruginosa IFO 3755</i>	500

<Fungi/yeasts>

<i>Pullularia pullulans IFO 6353</i>	75
<i>Cladosporium cladosporioides IFO 6348</i>	80
<i>Chaetomium globosum ATCC 6205</i>	75
<i>Penicillium citrinum ATCC 9849</i>	100
<i>Aspergillus niger ATCC 6275</i>	75
<i>Aspergillus oryzae</i>	50
<i>Rhizopus stolonifer S.N.32</i>	75
<i>Gliocladium virens IFO 6355</i>	100
<i>Trichophyton ferrugineum</i>	100
<i>Trichophyton rubrum</i>	100
<i>Trichophyton interdigitale</i>	100
<i>Trichophyton meniaegrophytes</i>	100
<i>Zygosaccharomyces salsus</i>	50
<i>Williano anomala</i>	50
<i>Candida sp.</i>	100
<i>Saccharomyces sp.</i>	100



(Data obtained by the laboratory of a pharmaceutical company and our company)



คุณสมบัติของการใช้โฟมทำความสะอาด ฟันปลอม-รีเทนเนอร์-invisalign (เครื่องมือแพทย์)

1. Broad-spectrum antibiotic มีฤทธิ์การฆ่าเชื้อครอบคลุมแบคทีเรีย เชื้อรา-เชื้อไวรัส ปราศจาก แอลกอฮอล์
2. ลดการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ (ODOR TRAP Technology)
3. สารนวัตกรรมเทคโนโลยีญี่ปุ่นเพื่อความปลอดภัยต่อมนุษย์
4. สารโฟมอะมิโนแอตซิด อ่อนโยนสูง ระคายเคืองต่ำปลอดภัย ต่อฟันปลอม-รีเทนเนอร์ ช่องปาก-ฟัน-เหงือก ระดับการทำความสะอาดดี เนื้อโฟมแน่น
5. กลิ่น Spearmint สดชื่น



ODOR TRAP
TECHNOLOGY

DENTURE & RETAINER

CLEANSER FOAM (เครื่องมือแพทย์)



โฟมทำความสะอาดฟันปลอม-รีเทนเนอร์ :

ได้รับการแนะนำจากทันตแพทย์ สำหรับทำความสะอาดฟันปลอม รีเทนเนอร์ อุปกรณ์จัดฟันใส และอุปกรณ์ป้องกันการนอนกัดฟัน โฟมทำความสะอาดฟันปลอม-รีเทนเนอร์ ไม่ทำลาย-ไม่ก่อให้เกิดการสีกร่อนของฟันผิวฟันปลอม-รีเทนเนอร์ จัดคราบมันและสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำได้อย่างหมดจด จัดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นปาก พร้อมด้วยกลิ่นมินต์สดชื่นใช้ง่าย เนื้อโฟมละเอียด ช่วยลดกลิ่นปากที่เกิดจากการใส่อุปกรณ์ในช่องปาก

รายละเอียดสินค้า-วัตถุประสงค์ :


โฟมทำความสะอาดฟันปลอม-รีเทนเนอร์ สามารถชำระล้างคราบมัน กำจัดกลิ่นจากอาหารที่รับประทาน เนื้อโฟมมีความปลอดภัยต่อช่องปาก และมีความละเอียดอ่อนโยน ไม่ทำลาย-ไม่ก่อให้เกิดการสีกร่อนของฟันผิวฟันปลอม-รีเทนเนอร์

วิธีใช้ :

- กดบีบเนื้อโฟม 2-3 ครั้ง ลงบนฟันปลอม-รีเทนเนอร์ และใช้แปรงสีฟันขนนุ่มทำความสะอาดเบาๆ ทั่ว
- ใช้ไม้พันสำลีเช็ดบริเวณร่องที่เข้าถึงยากต่อการทำความสะอาด
- ล้างน้ำออกให้สะอาดแนะนำให้ใช้ทุกครั้งหลังมื้ออาหารเพื่อความสะอาด สดชื่น

คำเตือน : หากฟันปลอมที่ล้างด้วยโฟมทำความสะอาดฟันปลอม นำไปใส่เข้าปากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ปรึกษาทันตแพทย์

การเก็บรักษา : เก็บโฟมทำความสะอาดให้พ้นแสงแดด และที่เปียกชื้น

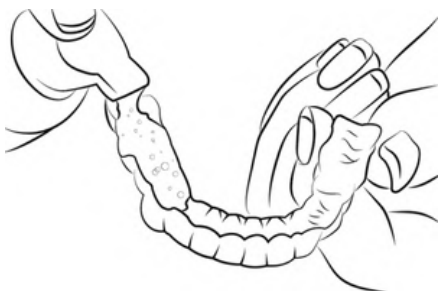

1.



2.



3.



ISO 22716:2007
CERTIFICATION



GMP
CERTIFICATION



HOTLINE :

064-983-8991

LINE ID :
i-cosmetic



FACEBOOK



i-COSMETIC co.,Ltd.

OEM Cosmetic Manufacturer

Skincare-Dental product-Medical Device

ISO22716 - GMP

<https://www.i-cosmetic.tech/>