



โฟมทำความสะอาด
ฟันปลอม-รีเทนเนอร์-invisalign
(เครื่องมือแพทย์)




คุณสมบัติของการใช้โฟมทำความสะอาด ฟันปลอม-รีเทนเนอร์-invisalign

(เครื่องมือแพทย์)


- กำจัดเชื้อรา-แบคทีเรีย (Broad-spectrum antibiotic)
- ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ลดคราบชา-กาแฟ
- ลด biofilm
- อ่อนโยนต่อฟันปลอม-รีเทนเนอร์
- ลดรอยขีดข่วน

สารโฟมทำความสะอาดพื้นปอลอม-รีเทนเนอร์ นวัตกรรมจากญี่ปุ่น : สารโฟมอะมิโนแอตซิด

Molecular Structure

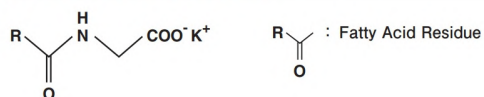

ระดับการทำความสะอาดสูง ความเป็นพิษต่ำ , มีความอ่อนโยนสูง

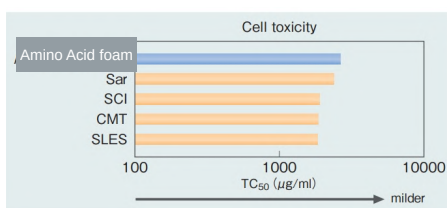

ทำความสะอาดได้ในสภาวะ pH ที่เป็นกลางหรือต่าง

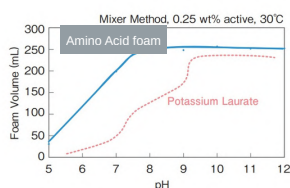


Figure 1 Foam Volume 1 min.


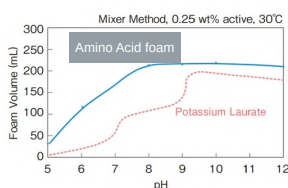



Figure 2 Foam Volume 5 min.

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์


Absorption of nitrogen and sulfur containing compounds

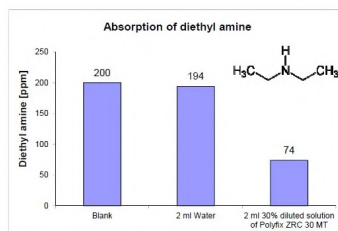

70µl 1:50 diluted diethyl amine aqueous solution

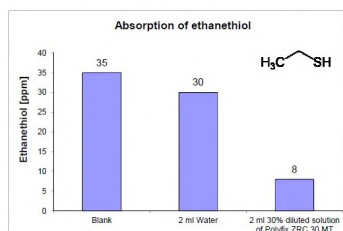

70µl ethanethiol from the solution of 50µl ethanethiol in 10g isooctane

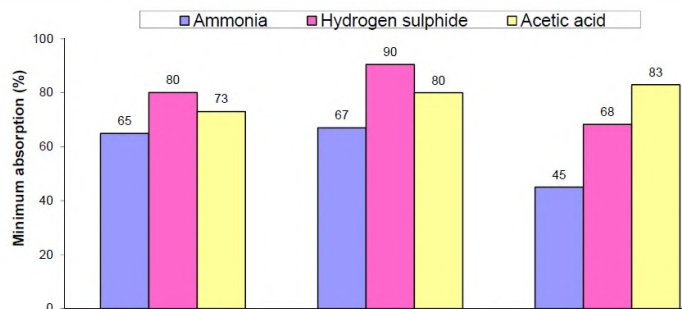



**สารฆ่าเชื้อสกัดจากพืชตระกูลมินต์ (japan)
เพื่อฟืนปลอม-รีเทนเนอร์
ระดับการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย-เชื้อราสูง
โดยปราศจาก แอลกอฮอล์**

Antibacterial activites

bacteria, fungi, and yeasts.

<Bacteria>

(Gram-positive bacteria)	MIC (ppm)
<i>Mycobacterium H2</i>	50
<i>Bacillus subtilis ATCC 6633</i>	150
<i>Bacillus fluorescens</i>	100
<i>Bacillus cereus</i>	150
<i>Staphylococcus aureus FDA 209P</i>	150
(Gram-negative bacteria)	
<i>Escherichia coli IFO 3301</i>	200
<i>Klebsiella pneumoniae IFO 13277</i>	200
<i>Vibrio parahaemolyticus IFO 12711</i>	250
<i>Salmonella typhimurium IFO 13245</i>	200
<i>Pseudomonas aeruginosa IFO 3755</i>	500

<Fungi/yeasts>

<i>Pullularia pullulans IFO 6353</i>	75
<i>Cladosporium cladosporioides IFO 6348</i>	80
<i>Chaetomium globosum ATCC 6205</i>	75
<i>Penicillium citrinum ATCC 9849</i>	100
<i>Aspergillus niger ATCC 6275</i>	75
<i>Aspergillus oryzae</i>	50
<i>Rhizopus stolonifer S.N.32</i>	75
<i>Gliocladium virens IFO 6355</i>	100
<i>Trichophyton ferrugineum</i>	100
<i>Trichophyton rubrum</i>	100
<i>Trichophyton interdigitale</i>	100
<i>Trichophyton meniaagrophytes</i>	100
<i>Zygosaccharomyces salsus</i>	50
<i>Williano anomala</i>	50
<i>Candida sp.</i>	100
<i>Saccharomyces sp.</i>	100

(Data obtained by the laboratory of a pharmaceutical company and our company)

DENTURE & RETAINER CLEANSER FOAM (เครื่องมือแพทย์)



โฟมทำความสะอาดฟันปลอม-รีเทนเนอร์ :

ได้รับการแนะนำจากทันตแพทย์ สำหรับทำความสะอาดฟันปลอม รีเทนเนอร์ อุปกรณ์จัดฟันใส และอุปกรณ์ป้องกันนอนกัดฟัน โฟมทำความสะอาดฟันปลอม-รีเทนเนอร์ ไม่ทำลาย-ไม่ก่อให้เกิดการสีกร่อนของพื้นผิวฟันปลอม-รีเทนเนอร์ ขจัดคราบมันและสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำได้อย่างหมดจด ขจัดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นปาก พร้อมด้วยกลิ่นมินต์สดชื่นใช้ง่าย เนื้อโฟมละเอียด ช่วยลดกลิ่นปากที่เกิดจากการใส่อุปกรณ์ในช่องปาก

รายละเอียดสินค้า-วัตถุประสงค์ :


โฟมทำความสะอาดฟันปลอม-รีเทนเนอร์ สามารถชำระล้างคราบมัน กำจัดกลิ่นจากอาหารที่รับประทาน เนื้อโฟมมีความปลอดภัยต่อช่องปาก และมีความละเอียดอ่อนโยน ไม่ทำลาย-ไม่ก่อให้เกิดการสีกร่อนของพื้นผิวฟันปลอม-รีเทนเนอร์

วิธีใช้ :

- กดบีบเนื้อโฟม 2-3 ครั้ง ลงบนฟันปลอม-รีเทนเนอร์ และใช้แปรงสีฟันขนนุ่มทำความสะอาดเบาๆ ให้ทั่ว
- ใช้ไม้พันสำลีเช็ดบริเวณร่องที่เข้าถึงยากต่อการทำความสะอาด
- ล้างน้ำออกให้สะอาดแนะนำให้ใช้ทุกครั้งหลังมื้ออาหารเพื่อความสะอาด สดชื่น

คำเตือน : หากฟันปลอมที่ล้างด้วยโฟมทำความสะอาดฟันปลอม นำไปใส่เข้าปากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ปรึกษาทันตแพทย์

การเก็บรักษา : เก็บโฟมทำความสะอาดให้พ้นแสงแดด และที่เปียกชื้น

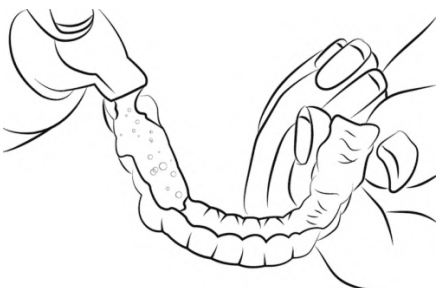

1.



2.



3.



ISO 22716:2007
CERTIFICATION



GMP
CERTIFICATION



HOTLINE :

064-983-8991

LINE ID :
i-cosmetic



FACEBOOK



i-COSMETIC co.,Ltd.

OEM Cosmetic Manufacturer

Skincare-Dental product-Medical Device

ISO22716 - GMP

<https://www.i-cosmetic.tech/>